

この度は3B Scientific の沐浴ベビーケアモデルをお選びいただき、ありがとうございます。このモデルの優れた品質はお客様のご要望に必ずお応えできるものと信じております。

高品質を保ち、永くお使いいただけるように、次の点にご注意ください。
・直射日光を避け、高温の場所には放置しないでください。

・洗浄が必要な際にはうすめの洗剤溶液をお使いください。しつこい汚れには、頭部の着色部をのぞき、アクリールをお使いください。シンナーは絶対に使用しないでください。

・着色液、ヨウ素を含む消毒液、油性および水性ペンハ製品の色をまねく危険性があります。

・本物の新生児の体重を再現するために、この製品の内部にはジェルが詰め込まれておりますので、先のとがったものなどで皮膚部分に穴をあけてしまわないようにご注意ください。

・潤滑剤を塗布する場合、水性性の製品のみをお使いください。油性および脂性の製品は使用しないでください。

・この説明書で解説されてる用途以外のご使用はお控えください。また、お子様の手の届かないところに保管してください。

この製品に関するお問い合わせ、ご意見をお持ちの場合は、足裏部に記されているシリアル番号とあわせてご連絡ください。

仕様

長さ: 51 cm
重量: 3000 g
頭囲: 33 cm
キヤリソングース付き

3B Scientific の沐浴ベビーケアモデルは小児看護専門家の方々との密接な協力のもとに開発されました。この新生児男児を忠実に再現したモデルは多様な看護練習を可能とします。

おむつの交換
使い捨て紙おむつや布おむつなどを使い、一般的なおむつ交換の練習ができます。ただし、ベビーオイル、ケリウム、パウダーなどは使用しないでください。

授乳・投薬
母乳哺育時と哺乳ビンでの授乳時の体位のとらせ方や、ピペットを使っての投薬練習ができます。内部を清潔に保つために水をご使用ください。

採尿
口から入った液体はしばらくすると尿道に流れ、排泄されます。採尿の練習には通常の採尿ノックをご使用いただけます。

着せ替え
新生児用の衣服を使い、着せ替えの練習ができます。

抱く・運ぶ・寝かせる等
実際の新生児にさわめて近い体重と関節の可動性のおかげで、抱き上げたり、運んだり、寝かせたりするなど
の練習が自然に行えます。

口・目・耳・鼻のケア, 沐浴
モデルを40℃以下のお湯の中に入れて、沐浴時の正しい新生児のケアの練習ができます。ガーゼや綿棒を使っての口、目、耳、鼻の清拭ができる他、鼻腔のケアにはヌボイトもお使いいただけます。耳内への浸水を防ぐ方法のデモンストラーションとして、指で軽く耳介を押し入れれます。

直腸温の測定
通常の直腸体温計をお使いいただけます。

泉門と鞏丸の触診
皮膚は柔らかくできておりますので、大泉門、小泉門、鞏丸の触診ができます。

ホームページ (<http://www.3bs.jp/>) では常に最新の商品情報をご提供しております。