

組立説明書

3B 気道管理トレーナー P73 (1026007, 1026076)

1. 吸盤式ベース部を覆っている透明な保護フィルムをはがします。



2. 首の皮膚をやさしく引き下げ、吸盤式ベース部のレバーを露出させます。



3. 清潔で平らな場所に気道管理トレーナーを置きます。

吸盤式ベース部をしっかり押さえながらレバーを下げ、吸盤を作動させて頭部を確実に固定します。



4. 首の皮膚を慎重に引き上げ、首の内部にある赤い円形コネクタを露出させます。




5. 主気管支チューブをコネクタに挿入し、時計回りに回してしっかり固定します。



6. 緑色の膨張バッグを2つ、左右の主気管支に接続して肺を再現します。3つ目のバッグは胃ポートに接続し、胃を再現します。



* 「Smarter Simulation」ラベルのバーコードをスキャンすると、製品登録ができ、製品情報にアクセスできます。
* アフターサービスのためにラベルは大切に保管してください。

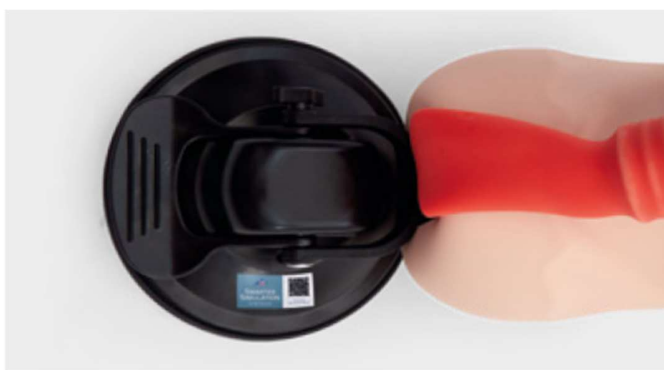

第4次区域気管支 (1026077) ※オプション

第4次区域気管支は別売りのオプション製品で、3B 気道管理トレーナーの機能を拡張するために設計されています。

使用方法：主気管支を赤い円形コネクタから取り外し、代わりに第4次区域気管支を取り付けます。



ご質問は右のバーコードをスキャンしてWEBサイトからお気軽にお問合せください



日本スリービー・サイエンティフィック株式会社

新潟県新潟市江南区曾野木 2-5-18 Tel: 0120-300-056 / 3bs.jp