



Japan Polymer Technology

JPTC

カバンに入るトレーニングルーム

Training Labs to fit in your bag

Palm Camera Stand

MIYABI & Mobile



Japan Polymer Technology

生まれ変わったパームカメラスタンド Updated Palm Camera Stand

軽く そして 小さく
Lighter and smaller in size

Palm Camera Stand **MIYABI**

ビデオカメラ用
For camcorder



Palm Camera Stand **Mobile**

スマートフォン用
For smartphone





Japan Polymer Technology



MIYABI



Mobile

台座にはQRコードの説明書付き
QR code instructions included

Palm Camera Stand MIYABI



本体重量：428g（カメラ重量を除く）
Weight 428g(Excluding camcorder)

Palm Camera Stand **MIYABI**

価格 22,000円（送料・消費税別）
最大高さ 260mm
重 量 428g
サイズ 90mm*90mm*12mm
QRコードの説明書付き
（ビデオカメラは付属していません）

Price 20200 yen
(excluding delivery fee and tax)
Maximum height 260mm
Weight 428g
Size 90mm*90mm*12mm
QR code instructions included
Excluding the camcorder

Palm Camera Stand Mobile



本体重量：247g (スマートフォンを除く)
Weight 247g (Excluding smartphone)

Palm Camera Stand Mobile

価格 18,000円 (送料・消費税別)
最大高さ 160mm
重量 247g
サイズ 60mm*60mm*12mm
QRコードの説明書付き
付属 スマートフォンホルダー
固定用粘着ゲルシート
(スマートフォンは付属していません)
Price 18,000 yen
(excluding delivery fee and tax)
Maximum height 160mm
Weight 247g
Size 60mm*60mm*12mm
QR code instructions included
Includes a smartphone folder
& a gel sheet for fixation
Excluding the smartphone



Palm Camera Stand **MIYABI** 使い方 How to use

- ・ノブを緩めれば関節は緩み、締めれば固定されます。
- ・ノブを締めてからカメラのネジ穴をカメラ固定リングのネジにカメラを回転させながら取り付けてください。ネジが締まりましたら、固定リングを回転させ締めてください。
- ・カメラを持ち、ノブを緩めましたらモニターを見ながら適切なカメラアングルを決めて、ノブを締めてください。
- Loosening the knob will loosen the joint and tightening the knob will secure it.
- After tightening the knob, attach the camera screw hole to the camera mount screw while rotating the camera.
- When the screw is tightened, rotate the fixed ring to tighten it.
- Hold the camera while loosening the knob.
- After loosening the knob, watch the monitor to adjust the angle of the camera. Then tighten the knob.

スマートフォンホルダー

Holder of Smartphone



カメラ固定リング

Camera fixed ring

アーム

Arm

関節

Arm joint

ノブ

Knob

関節

Arm joint

QRコード

QR code

台座

Pedestal

離形紙付きゲルシート

Gel sheet with a release film

Palm Camera Stand **Mobile**

使い方 How to use

- ・ノブを緩めれば関節は緩み、締めれば固定されます。
- ・ノブを締めてからホルダーのネジ穴をカメラ固定リングのネジにホルダーを回転させながら取り付けてください。ネジが締まりましたら、固定リングを回転させ締めてください。
- ・ノブを締めてから、ホルダーをA及びB方向へ広げ、スマートフォンを設置してください。
- ・台座のゲルシートから離形フィルムを剥がして、設置してください。

- Loosening the knob will loosen the joint and tightening the knob will secure it.
- After tightening the knob, attach the holder screw hole to the camera mount screw while rotating the holder.
- When the screw is tightened, rotate the fixed ring to tighten it.
- To install the smartphone, expand the holder toward A and B after tightening the knob.
- Remove release film from gel sheet on pedestal and install.



ご使用時の注意 Notes

- ・ 平面で凹凸のない場所へ設置してください。
- ・ 台座上部からカメラが外れると倒れます。
- ・ ノブを締めないと練習中に倒れます。
- ・ カメラアングルを変える時は、必ずカメラ、スマートフォンを持ってからノブを緩めてください。
- ・ ノブを緩めずにカメラ、スマートフォンを動かすとアームの関節が壊れることがあります。
- Install the stand on a level surface that is not uneven.
- The camera will fall over if removed from the top of the stand.
- If you don't tighten it, it will fall over while you're training.
- When changing camera angles, always hold the camera before releasing the knob.
- The arm joints may be damaged if you move the camera before loosening the knob.



カバンに入るトレーニングルーム
JPTC Training room that fits in your bag

778g

MIYABI & LapaSta



カバンに入るトレーニングルーム
JPTC Training room that fits in your bag

597g


Mobile & LapaSta



Japan Polymer Technology

生まれ変わったパームカメラスタンド Updated Palm Camera Stand

MIYABI, LapaSta, MUGEN & WA

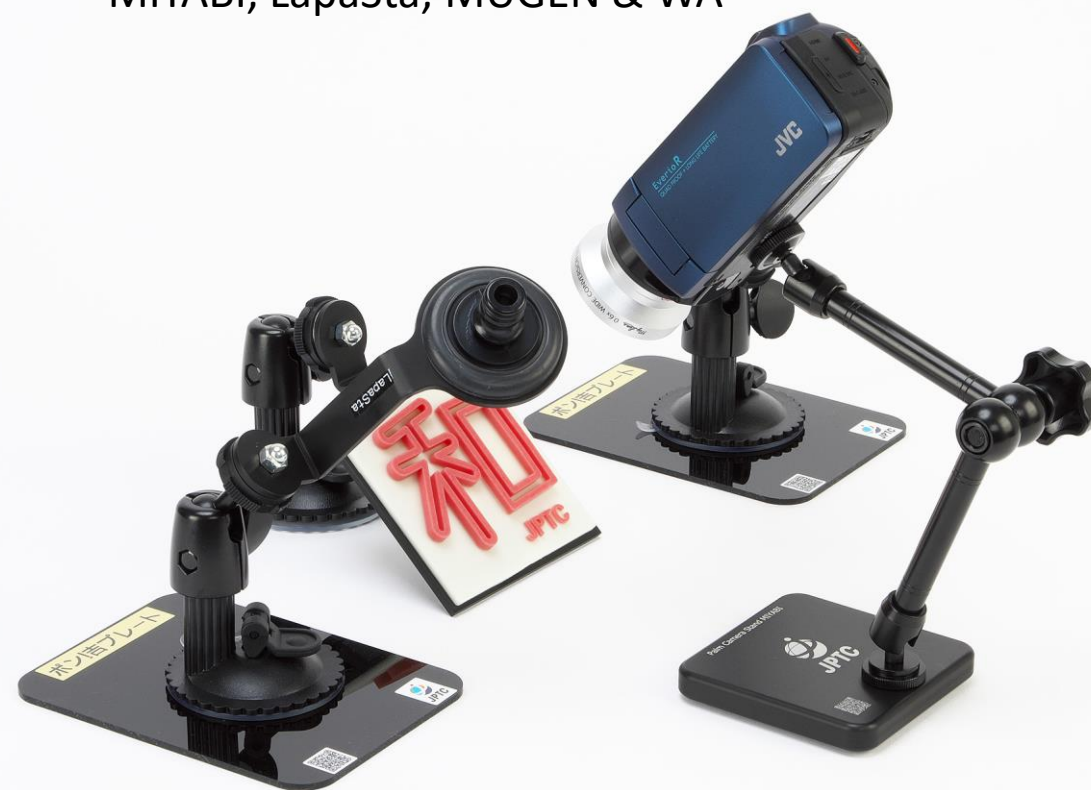

限定された場所でも設置できます
It can be installed in limited space



Japan Polymer Technology

生まれ変わったパームカメラスタンド Updated Palm Camera Stand

Mobile, LapaSta, MUGEN & WA



限定された場所でも設置できます
It can be installed in limited space